



DROGUERÍA
JANMEDIC

JAN MEDICAL IMPORT E.I.R.L.
R.U.C. 20607805165

Importación y Comercialización de Material Médico,
Laboratorio, Dental, Venta de Equipos Médicos,
Reparaciones y Repuestos en General

LAMPARA RODANTE

Marca: JIANSHIFU

Mod: JSF-JCA02

Proced.: CHINA





DROGUERÍA
JANMEDIC

JAN MEDICAL IMPORT E.I.R.L.
R.U.C. 20607805165

Importación y Comercialización de Material Médico,
Laboratorio, Dental, Venta de Equipos Médicos,
Reparaciones y Repuestos en General

Esta lámpara LED portátil está diseñada para uso en quirófanos pequeños, exámenes ambulatorios y consultorios médicos, iluminación con Osram importada de Alemania, con luz estable y tiempo de trabajo prolongado. El filtro de color de vidrio crea una luz blanca y suave como la luz natural. Este producto es apto para exámenes físicos, pequeñas operaciones de otorrinolaringología, departamento de ginecología y obstetricia y departamento de pacientes ambulatorios, también funciona como iluminación asistida en operación.



Retírelo cuando todos los frenos en la rueda base estén liberado, activar los frenos mientras trabajas. Manéjelo con cuidado en caso de que esté fuera de forma y daños cuando está en instalación y uso. Límpielo con un paño suave humedecido con alcohol u otro detergente suave con cuidado.

PARAMETRO TECNICO PRINCIPAL

- Potencia de la bombilla : 9W
- Iluminación (300 mm) : 30000Lux
- Temperatura del color : 6500K

Vida útil de la lámpara : ≥ 50000 h



DROGUERÍA
JANMEDIC

JAN MEDICAL IMPORT E.I.R.L.
R.U.C. 20607805165

Importación y Comercialización de Material Médico,
Laboratorio, Dental, Venta de Equipos Médicos,
Reparaciones y Repuestos en General



No.	Nombre
1	Interruptor
2	Adaptador de lámpara
3	Brazo de lámpara
4	Caja de atenuación
5	Conexión de ajuste de altura
6	Línea eléctrica
7	Tubo recto
8	Conexión de hierro
9	Base
10	Rueda

LISTA DE EMBALAJE

- Soporte de lámpara : 1
- Base : 1
- Rueda : 5
- Tornillo : 2
- Anillo de hierro : 1
- Manual de usuario : 1



DROGUERÍA
JANMEDIC



JAN MEDICAL IMPORT E.I.R.L.
R.U.C. 20607805165

Importación y Comercialización de Material Médico,
Laboratorio, Dental, Venta de Equipos Médicos,
Reparaciones y Repuestos en General

INSTALACION

	1°. Recoge las ruedas y la base de la caja		4°. Elige el portalámparas
	2°. Montar las ruedas con la base		5°. Conecte la base y portalámparas con el icono del anillo y luego apriétalos con los tornillos
	3°. Recoge el anillo de hierro y los tornillos.		6°. Instalación terminada

USO

- 1°. Enciende la luz
 - A. Enchufe la fuente de alimentación
 - B. Presione el interruptor en la cabeza de la lámpara
 - C. Presione  en la caja de atenuación
- 2°. Ajustar brillo
Presione  para ajustar el brillo
- 3°. Ajustar la altura de la lámpara
Desenrosque la cubierta blanca, suba o baje el portalámparas a la posición adecuada, apriete la cubierta blanca.